

位置情報見守りシステム あんしん花子 GPS

春日井市
認知症高齢者等
見守り支援事業
対応



GPS 位置情報サービス

あんしん花子は小さいのでどこでもそっと装着でき、靴のかかとの中に入れることもできる超小型のGPS端末です。最大5人のスマホやパソコンに通知メールが届きます。GPS機能により、ゼンリンの地図上に表示され、簡単に位置情報を検索できます。

福祉用具情報システム

TAISコードを取得しています。

TAISコード 01879-000003
サイズ 47.5×38.5×11.85(mm)
重量 約25g



あんしんGPSシューズZ
外側ジッパー

どちらも左足のかかと部分にGPS機器を入れます。

■バッテリーの減少通知

バッテリーの消耗をメールで通知するので安心です。
(残75%、50%、30%、15%充電して下さい。)

■遠隔ブザー

■充電時間：最大2時間

■連続待受け時間：約1週間

(日本全国ドコモのサービスエリアでご利用可能です。)

あんしん花子 GPS

●初期費用(税込)

16,400円 - 助成額(10,000円)

ご利用者様負担額

6,400円

●月額利用料(税込)

1,980円/月

履き慣れた靴、お気に入りの靴にもGPSが装着できるように加工ができます。

カスタマイズ加工条件

下記の条件を満たせばお好みの靴で加工可能！革靴・スニーカーもOK！

- 靴底の厚さが3cm以上ある靴 ※わずかに足りない場合は厚みを足すこともできます。
- 靴底の踏まず部(一番狭い所)の幅が5cm以上ある靴
- 中敷き(インソール)が外せる靴
- 踵部エアバックなどのパーツが入っていない靴



ウェアラブル・IoT 見守り機器開発 販売・レンタルサービス

株式会社 サイチ

〒444-0303 愛知県西尾市中畑町宮西34-1

TEL 0563-59-5252 メールアドレス post@saichi.jp

URL : <https://www.saichi.jp>

あんしん GPS シューズ カラー:ブラック **11,880円**(税込)
 サイズ:SS(22.0~22.5cm)、S(23.0~23.5cm)、M(24.0~24.5cm)、L(25.0~25.5cm)
 LL(26.0~26.5cm)、3L(27.0~27.5cm)

あんしん GPS シューズ Z カラー:ブラウン、ブロンズ、ブラック **11,880円**(税込)
 サイズ:SS(22.0~22.5cm)、S(23.0~23.5cm)、M(24.0~24.5cm)、L(25.0~25.5cm)
 LL(26.0~26.5cm)、3L(27.0~27.5cm)

※ブロンズは SS~M(22.0/22.5 cm~24.0~24.5 cm)



あんしん GPS シューズ ブラック



あんしん GPS シューズ Z ブラック



あんしん GPS シューズ Z ブロンズ



あんしん GPS シューズ Z ブラウン

NEW

あんしん GPS シューズ S
 カラー:ブラック、ワイン **9,680円**(税込)

履き慣れた靴、お気に入りの靴 カスタマイズ加工
17,600円(税込)+送料



あんしん GPS シューズ S ブラック

サイズ:SS~3L



あんしん GPS シューズ S ワイン

サイズ:SS~L

「オリジナルあんしん GPS シューズ加工の特徴」

かかとソール補強プレートを配し、摩耗したソールの補修時期がどなたでもわかりやすく、またソール側からの防水効果も底面からの突き上げからも大幅アップ、GPSを保護する設計が施されています。



■充電

付属の充電ケーブルの端子を本体の外部接続コネクタにゆっくり差ししてください。

充電中は電池LEDランプが赤色 ● に点灯し、充電が完了すると、緑色 ● に点灯します。

充電が完了したら、本体とACアダプタをはずしてください。

※正しくない方法で充電が行われると、製品が破損する恐れがあります。

正しくない方法による破損は、保証対象外となります。



■防水

あんしん花子本体は完全防水ですが、念の為装着する前に写真のようにビニール袋で包んでご利用下さい。(写真は靴の例です)



検索方法:アプリは不要です。PC、タブレット、スマートフォンから検索可能。
機種も携帯会社も選びません。

■位置情報検索


あんしん花子のウェブサイトへ接続して、位置情報を検索します。
ゼンリンの地図上にピンが立ち、居場所を表示します。
最大5人のパソコン、スマホがご利用できます。



■振動感知

あんしん花子は、加速度センサーを内蔵していますので、移動するとその振動を感知します。また、本体の橙色のボタンを押すと、あらかじめ設定した相手先(スマホ側)にメールで通知します。

橙色のボタン

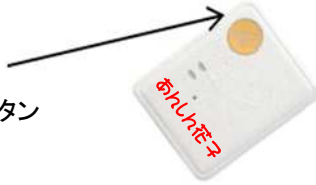

■エリア通知機能

中心点と半径を定めたエリアを設定することができます。
このエリアを出ると、あんしん花子が作動し、あらかじめ設定した相手先(スマホ側)にメールが届きます。また、エリアの外から中への移動も通知することができます。



■位置情報履歴



位置情報履歴で直近1,000件までの履歴を見る事ができます。
その際に移動4ヶ所までの位置情報が地図上に表示されます。
端末の現在地(測位した時間、住所、検索時の端末の状態、測位精度、緯度経度)が表示されます。

こんな方が利用しています。

- 出掛けると道に迷い帰宅できない方。
- 一人で公共交通機関を利用して病院へ出掛けていく為、位置情報確認したい方。
- 入所先の施設で出掛けてしまう方。
- 遠く離れたご家族の方が見守り、そして位置情報確認できるように

帰り遅くない？
心配だな・・・



あしん花子Q&A

Q 契約時に事業者が訪問し、説明してくれますか？

A ご都合の良い日時を調整させて頂き、訪問し、ご説明・設定をさせていただきます。

Q 契約、納品後すぐに使用できますか？

A USBケーブル、ACアダプタを付属しておりますので納品後すぐにご利用可能です。

Q 毎月の支払方法はどちらになりますか？

A 口座振替、クレジットカードどちらもご利用できます。

Q 靴のサイズが合うか心配です。

A 訪問時に何足かお持ちしますのでその中から合うサイズをお選び頂けます。

Q 1回の充電でどれくらい使用できますか？

A 約1週間使用できますが、アクセス回数によって異なります。

Q 充電時間はどれくらいかかりますか？

A 完全に電池が切れてからの充電の場合、最大2時間で充電可能です。

Q 電池の充電が心配です。

A 電池残量は登録したアドレスに、電池残量75%、50%、30%、15%電池切れの5段階でメール通知が届きます。

Q 雨に濡れても壊れませんか？

A IPX8の完全防水ですので、安心してお使い下さい。

Q 遠方に見守りたい家族が住んでいます。遠方でも位置情報は確認できますか？

A みちびき人工衛星、NTTドコモ4G、LTE回線を利用していますので日本全国で検索できます。

Q 通知用メールアドレスを何件まで登録できますか？

A 通知用メールアドレスは5件まで登録可能です。ただし、同時に検索通信はできません。